



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů ve zdravotnictví, potravinářství a komunální hygieně.

Biocid

desam® OXI

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Bez nepříjemného zápachu - použití i v přítomnosti pacientů
- Šetrný k dezinfikovaným materiálům
- Ohleduplný k životnímu prostředí
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití

desam® OXI je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace), komunální hygieně a potravinářství. Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo). Nepoužívat na pozinkované povrchy, barevně nestabilní a mechanicky poškozené povrchy. Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam® OXI se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky. Důkladně opláchněte dezinfikované plochy a předměty, které mají přijít do styku s potravinami.



Složení

100 g přípravku **desam[®] OXI** obsahuje následující účinné látky:

- 11 g Peroxid vodíku
- 2 g Didecyldimethylammonium chloride
- 2,8 g Alkyldimethylbenzylammonium chloride

Další složení:

povrchové aktivní látky, parfém

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, kůže a neošetřené dřevo, barevně nestabilní a porézní materiály.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam OXI 1 l	12/Karton	70002260
Desam OXI 5 l	1/Kanistr	70002261



Související přípravky

- desam[®] OX

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schülke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com